




# Brugsvejledning ACE II Basic Plus

Brændselscelle teknologien er udviklet til at måle alkohol i vore ånde. Denne teknologi er meget præcis, og nøjagtigheden er +/- 5% ved 1 promille (I henhold til DOT regulativerne).


## Komponente

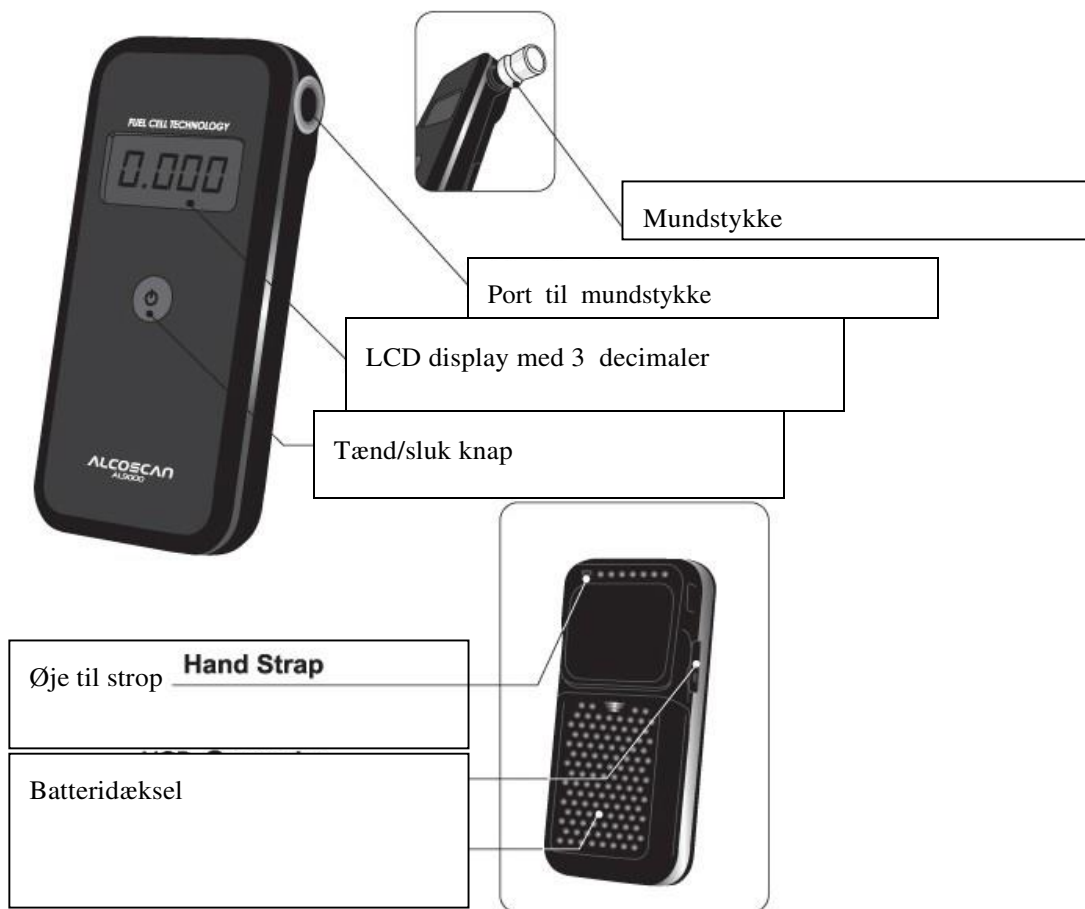

## Indhold

Alkometer, mini kuffert, 5 mundstykker, 2 stk AAA Batterier, Etui, Strop, og brugsvejledning

## Vejledning

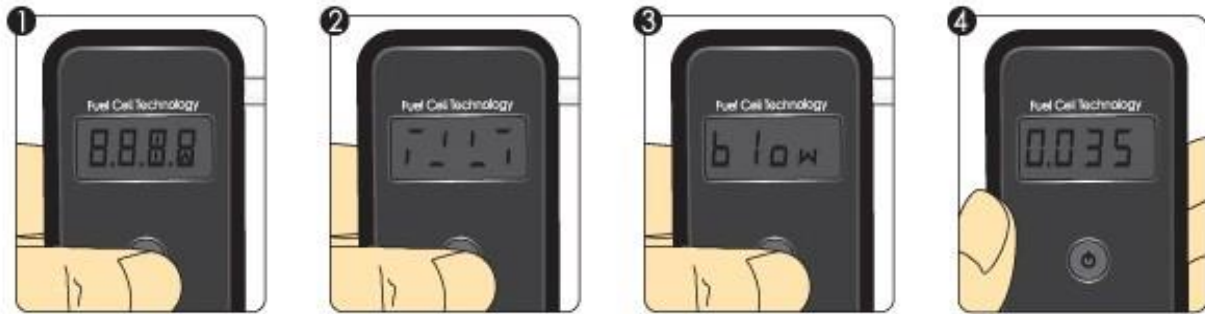

1. Tryk på tænd/sluk knappen.
2. Enheden er klar til måling når "blow" vises på displayet.
3. Blæs i mundstykket i 4 sekunder eller indtil kontrol lyden forsvinder.
4. Resultatet vises i 15 sekunder. Hvis du ønsker at foretage en måling mere, skal du trykke på tænd  
Knapen når baggrundsbelysningen er slukket.
5. Alkometret slukker automatisk efter 4 minutter..

\* Hvis du holder tænd/sluk knappen nede, vises det samlede antal målinger der er gennemført.

## Forholdsregler

- a. Der skal gå mindst 20 minutter efter indtagelse af måltider/alkohol før måling foretages. Alkohol og mundskyllemidler i mundhulen, kan påvirke målingen..
- b. Undgå målinger i kraftig blæst, og dårlig ventilation påvirker opvarmningstiden.
- c. Blæs ikke røg eller andre kemiske stoffer i enheden, da disse kan ødelægge sensoren.
- d. Alkometre bør ikke anvendes som garant før kørsel etc.
- e. Enheden må ikke udsættes for høje temperaturer.
- f. Enheden skal kalibreres med jævne mellemrum, senest efter 12 måneders brug!

## Specifikationer

Visning af B.A.C (med 3 decimaler)	0.000 til 4.000 ‰ eller 0.000 til 2.000 mg/l eller 0.000 til 0.400 %BAC i LCD Display
Opvarmning	5 sekunder ~ 2 minutter
Respons tid	I løbet af 10 sekunder ved 0.10 %BAC
Mundstykker	Anvend udelukkende originale standard mundstykker
Sensor	Brændselscelle
Strømforsyning	To 1.5V "AAA" alkaline batterier
Batteri kapacitet	Ca. 500 målinger

Vægt	100g (med batterier)
dimensioner(mm)	106 X 50 X 20
Arbejdstemperaturer	I brug : 5 til 40 °C Opbevaring : 5 til 50 °C
Nøjagtighed	±0.005 %BAC ved 0.100 %BAC (±5% - dvs. Minimum 95%)

#### Advarsler



Hvis "Flow" vises i displayet, er der ikke pustet kraftigt nok i mundstykket. Tænd enheden og prøv igen.



Hvis "bat" vises i displayet, skal batterierne skiftes.  
Please replace the batteries.

European Homecare  
ApS Viadukt alle 16  
2900 Hellerup  
info@homecare.dk